

Praktické tipy

IPR - Interproximální redukce / Stripping



1

V případech masivního stěsnání použijte separační techniku k otevření kontaktů před zahájením IPR - separační kroužky, pružinky...

4

Pomocí dentální nitě zkontrolujte, zda na aproximální plošce nevznikl schůdek.

2

Ke strippingu používejte speciální diamantované špičky pro IPR, nebo ruční separační pásky. K doleštění se osvědčily jemné Sof-lex disky.

5

Pomocí dentální nitě zkontrolujte, zda je kontakt zcela přerušen.

3

Ke kontrole získaného prostoru používejte měřicí pásky.

6

Po strippingu je vhodné broušené plochy fluoridovat.

Praktické tipy

Lepení



1 Zkontrolujte povrch zubů. Zuby, na které budete lepit attachmenty, důkladně depurujte rotačním kartáčkem a depurační pastou bez oleje. Dodržujte všechny zásady a postupy pro práci s kompozity.



2 Před lepením vyzkoušejte šablonu. Pokud nesedí přesně na bukalních ploškách v místě attachmentů, můžete ji rozříznout a při lepení přimáčknout prstem nebo vhodným nástrojem k zubu.



3 Ke snadnému **odstranění šablony** použijte velký skaler, kterým uvolníte palatinální nebo lingvální okraj fólie.



4 **Usazení fólií** pomůže opatrné skousnutí přes vatový váleček.



5 **Po nalepení** odstraňte přebytky kompozitu.